



SMV Sippi


6H av Sippi

™

vLd

SHITMSLUKLD rUKLUH


1. UUFULU

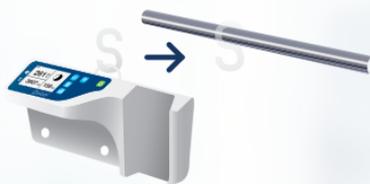

2. Start Sippi



3. 2LLUUWTK RZPHZLUOLU

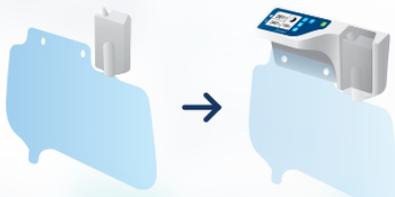

4. 2SLDU BLLL



TLUFLMMSOMSFHTUSFSFT
4QQBSTLMSFUOHU
OOMFFOFMFUMSFOES
OMHTLMOTLBSFMFOU

BSUMLTLK OSKLDHLDUL TUUKL



4OLOHTLMSFUGSFT
QQTUSUEODQTFOU



Observe Medical
Krokslätt Parkgata 4, 431 68 Möndal
| observemedical.com

Quick Guide Sippi™


Löpande hantering av Sippi™

För uppstart av Sippi vid anslutning till ny patient – vänd sida.

Sippi håller själv reda på timmar och vätskedygn. Avläsning av timdiures och nollning av föregående vätskedygn är normalt all hantering som behövs.

Avläsning timdiures

Avläs Sippi via displayen.

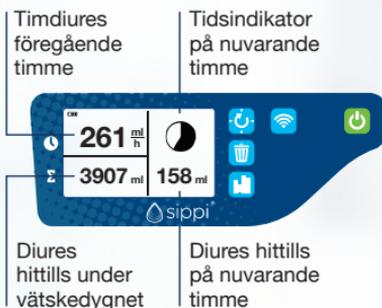

Att påbörja ett nytt vätskedygn

Håll inne papperskorgs-knappen i minst 3 sekunder någon gång under första timmen EFTER påbörjat nytt vätskedygn.



Det nya vätskedygnet räknas från senaste omslag till hel timme efter nollning. Sippi kommer ihåg denna tidpunkt nästa vätskedygn.

Tänk på!

- En rakt upphängd Sippi mäter bättre
- Sippi delar upp timdiuresen automatiskt i hela timmar
- Mjölkning av slangen rekommenderas ej
- Vid fler frågor läs användarinstruktionen

Historik – pågående vätskedygn

Tryck på historikknappen för att stega igenom och få översikt över patientens diures hittills under pågående vätskedygn.

