


Guida rapida Sippi™

Avvio di Sippi™ con connessione a un nuovo paziente

Per l'uso regolare di Sippi, vedere a tergo.


1. Appendere Sippi al letto

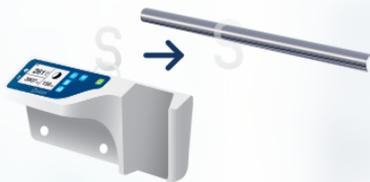

2. Avviare Sippi



3. Collegare una nuova sacca di raccolta urina con cassetta all'unità base

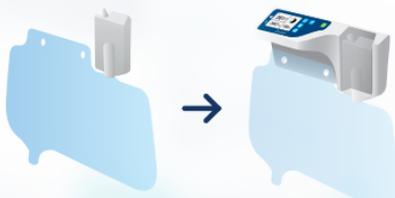

4. Collegare il raccordo della sacca di raccolta urina al catetere



Notare che Sippi non registra il volume completo in caso di minzione veloce. Generalmente questo volume iniziale contenuto nella vescica è clinicamente irrilevante.

5. Per impostare la prima ora, tenere premuto il pulsante di sincronizzazione per almeno 3 secondi



La sincronizzazione è necessaria solo all'avvio con un nuovo paziente.

Guida rapida Sippi™


Uso regolare di Sippi™

Per l'avvio di Sippi con connessione a un nuovo paziente, vedere a tergo.

Sippi tiene automaticamente conto di ore e giorni di misurazione. In genere è sufficiente leggere la diuresi oraria e azzerare il volume giornaliero di liquidi relativo al giorno precedente.

Letture della diuresi oraria

Leggere sul display il valore rilevato da Sippi.

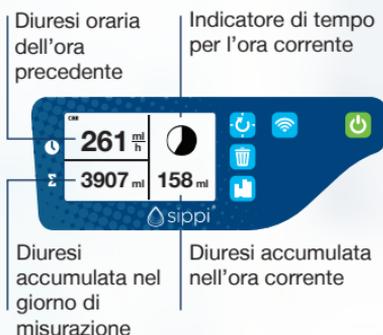

Inizio di un nuovo giorno di misurazione

Tenere premuto il pulsante con il cestino per almeno 3 secondi durante la prima ora DOPO l'inizio di un nuovo giorno di misurazione.



Il nuovo volume giornaliero di liquidi viene conteggiato dalla prima ora intera dopo l'azzeramento. Sippi ricorda questo orario nel giorno di misurazione seguente.

Note

- Se appeso in posizione eretta, Sippi misura meglio.
- Sippi ripartisce automaticamente la diuresi oraria per ore intere.
- Si sconsiglia di strizzare il tubo.
- Per maggiori dettagli, vedere le istruzioni per l'uso.

Storico – giorno di misurazione corrente

Premere il pulsante dello storico per scorrere e ottenere un quadro della diuresi accumulata del paziente nel giorno di misurazione corrente.

