




Hurtigveiledning for Sippi™

Oppstart av Sippi™ ved tilkobling til ny pasient

Bla om for løpende håndtering av Sippi.


1. Heng Sippi opp på sengen

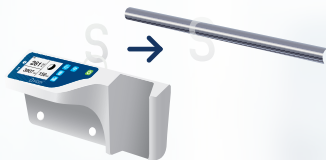

2. Start Sippi



3. Koble en ny urinpose med kassett til baseenheten

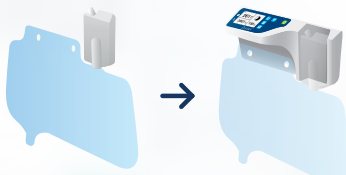


4. Koble urinposen til kateteret



Husk at ikke all urin vil registreres av Sippi ved rask blæretømming. Det innledende volumet i blæren er vanligvis klinisk irrelevant.

5. Still inn første time ved å holde synk-knappen inne i minst 3 sekunder

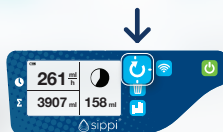

Synking skal bare utføres ved oppstart av en ny pasient.

Hurtigveiledning for Sippi™


Løpende håndtering av Sippi™

Bla om for oppstart av Sippi ved tilkobling til ny pasient.

Sippi holder selv orden på timer og væskedøgn. Avlesning av timediurese og nulling av forrige væskedøgn er vanligvis den eneste håndteringen som trengs.

Avlesning av timediurese

Les av Sippi via displayet.

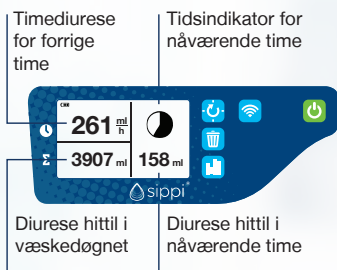

Påbegynne et nytt væskedøgn

Hold papirkurv-knappen inne i minst 3 sekunder en gang i løpet av den første timen ETTER et påbegynt nytt væskedøgn.



Det nye væskedøgnet regnes fra siste overgang til hel time etter nulling. Sippi husker dette tidspunktet neste væskedøgn.

Tenk på!

- Sippi måler bedre når den henger rett
- Sippi deler timediuresen automatisk inn i hele timer
- Melking av slangen anbefales ikke
- Les bruksanvisningen ved flere spørsmål

Historikk – pågående væskedøgn

Trykk på historikk-knappen for å gå trinnvis gjennom og få oversikt over pasientens diurese hittil i det pågående væskedøgnet.

