




Skrócona instrukcja obsługi Sippi™

Uruchamianie Sippi™ przy podłączeniu kolejnego pacjenta do urządzenia

Instrukcja bieżącej obsługi Sippi – patrz na odwrocie.


1. Zawiesić urządzenie Sippi na łóżku.

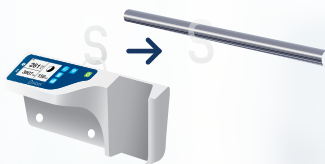

2. Włączyć urządzenie.



3. Podłączyć nowy worek na mocz z kasetką do jednostki podstawowej.

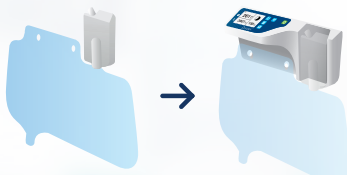


4. Podłączyć złącze worka na mocz do cewnika.



Należy pamiętać, że podczas szybkiego opróżniania pęcherza moczowego Sippi nie wykryje całego moczu. Z klinicznego punktu widzenia ta początkowa zawartość moczu w pęcherzu jest zazwyczaj nieistotna.

5. W celu ustawienia pierwszej godziny należy przytrzymać przycisk synchronizacji przez co najmniej 3 sekundy.

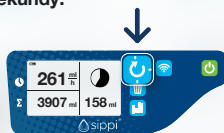

Synchronizację należy przeprowadzać wyłącznie przy podłączaniu kolejnego pacjenta.

Skrócona instrukcja obsługi Sippi™

Bieżąca obsługa Sippi™

Uruchamianie Sippi przy podłączeniu kolejnego pacjenta do urządzenia – patrz na odwrocie.

Sippi samodzielnie odmierza godziny i doby zbiórki moczu. Odczytywanie diurezy godzinowej i wyzerowanie poprzedniej doby zbiórki moczu to zazwyczaj jedyne czynności niezbędne do obsługi urządzenia.

Odczytywanie diurezy godzinowej

Odczytywanie danych z wyświetlacza.

Diureza godzinowa w poprzedniej godzinie.

Wskaźnik czasowy bieżącej godziny.



Dotychczasowa diureza w ciągu doby zbiórki moczu.

Dotychczasowa diureza w bieżącej godzinie.

Rozpoczynanie nowej doby zbiórki moczu

Przytrzymać przycisk z symbolem kosza na śmieci co najmniej 3 sekundy w dowolnym momencie w ciągu pierwszej godziny PO rozpoczęciu nowej doby zbiórki moczu.



Nowa doba zbiórki moczu będzie liczona od ostatniej zmiany na pełną godzinę po wyzerowaniu. Sippi zapamięta ten moment w kolejnej dobie.

Uwaga!

- Sippi dokonuje dokładniejszych pomiarów, jeżeli jest zawieszony prosto.
- Sippi automatycznie dzieli diurezę godzinową na pełne godziny.
- Nie zaleca się wyciskania drenu.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Historia – bieżąca doba zbiórki moczu

Nacisnąć przycisk historii, aby zapoznać się z dotychczasową diurezą pacjenta w bieżącej dobie zbiórki moczu.

